

Un outil de diagnostic essentiel pour gérer la fertilité de la vache

OVUCHECK WELL

Test semi-quantitatif de dosage de progestérone dans le
lait chez la vache

Données

La première possibilité pour diagnostiquer la gestation d'une vache est le dosage de la progestérone. En effet, la concentration en progestérone varie en fonction du stade physiologique de la femelle. Très faible durant les cinq jours qui entourent les chaleurs, elle augmente ensuite et reste élevée pendant la gestation. Une mesure de la progestérone réalisée entre 19 et 23 jours après l'insémination permet donc de détecter des vaches non gestantes, caractérisées par un taux de progestérone faible.

OVUCHECK® WELL permet l'évaluation qualitative du taux de progestérone dans une goutte de lait de vache. La quantité de progestérone présente dans l'échantillon est indiquée par le développement d'une couleur et sa comparaison à une couleur témoin. Ce kit est simple et rapide d'emploi. Il fournit des indications fiables sur la gestion de la fertilité chez la vache.

Avantages du produit


- Test semi-quantitatif
- Méthode ELISA de compétition
- Exécution rapide : résultats en moins de 30 minutes
- Nombre de tests par kit : de 16 à 31 tests possibles



Groupe



Procédure d'utilisation

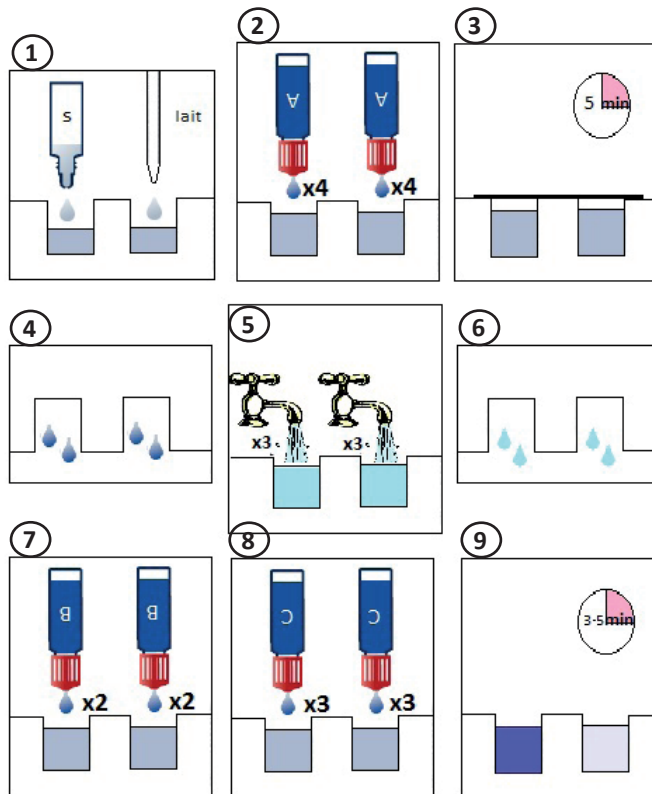

Interprétation des résultats

Utilisation	Date d'échantillonnage	Résultat du test	Interprétation
Détection du retour à l'oestrus	19 jours après l'insémination.	Même couleur ou plus foncé que le standard. Plus clair que le standard.	Vache probablement en chaleur. Observer les signes de chaleur. La vache n'est pas en oestrus
Indication de non-gestation	24 jours après l'insémination.	Même couleur ou plus foncé que le standard. Plus clair que le standard.	Vache non gestante. Observer le retour des chaleurs. Le test seul ne permet pas de confirmer la gestation.
Détection des chaleurs avant insémination	Jour de l'insémination.	Plus foncé que le standard. Même couleur que le standard. Plus clair que le standard.	Indication de chaleurs. Non concluant. Tester à nouveau le jour suivant. Vache pas en chaleur.

Référence	Désignation	Condit.
B8RDTRM560	Ovucheck WELL Visuel Bovin	1x16 tests

Groupe